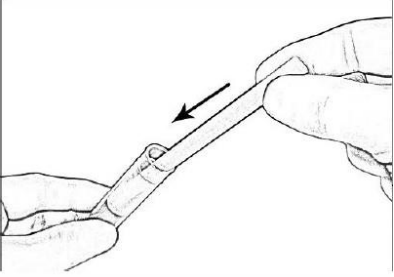
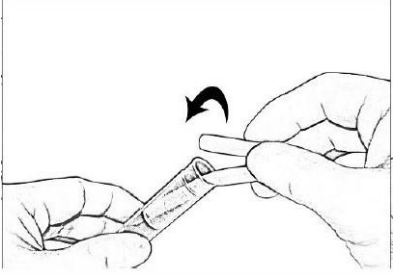
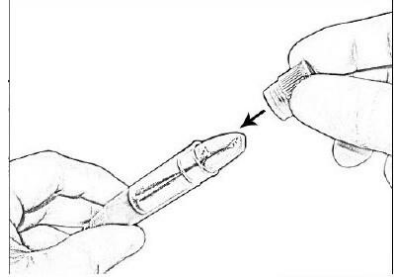


Gebruiksaanwijzing speekselverzameling

Voor de ouders/verzorgers

Stap 1	Open de verpakking van de Children's Swab en haal de lange wat eruit. Leg het naast het buisje met het paarse dopje.
Stap 2	Houd 1 uiteinde van de lange wat goed vast en plaats het andere uiteinde onder de tong van het kind.
Stap 3	Houd de wat onder de tong voor ong. 60-90 seconden. Lukt dit niet in 1 keer, haal dan de wat tussendoor even uit de mond en probeer het in meerdere keren.
Stap 4	Stop als het onderste deel van de wat goed nat is.
Stap 5	Trek het paarse dopje van het buisje. Laat hierbij het opvangbakje in het buisje zitten. Stop het natte deel van de wat in het opvangbakje van het buisje. 
Stap 6	Vouw het droge deel van de wat ook in het opvangbakje. Dit past precies als je de wat goed doordrukt. Zorg dat beide uiteinden van de wat aan de onderkant van het opvangbakje zitten. De wat zit dan helemaal boven in de buis, in het opvangbakje. 
Stap 7	Druk het paarse dopje stevig terug op het buisje. Een deel van de dubbelgeklapte wat zal hierbij in de dop verdwijnen. Zorg dat de dop goed vast zit. 
Stap 8	Stop het buisje terug in het sluitzakje.
Stap 9	Bewaar het sluitzakje met het buisje in de koelkast.
Stap 10	Beloon eventueel het kind dmv een sticker (geen snoep! 😊) na elke geslaagde speekselverzameling.